


Geräteeinstellung und Zusammenbau Biopuls 2000D:

Bitte beachten Sie, dass die medizinische Einweisung immer durch den behandelnden Arzt erfolgt, unabhängig davon, ob ihm das vorliegende Gerät bekannt ist. Das bedeutet:




- Sie werden über die Risiken der Therapie aufgeklärt
- Sie werden darüber informiert, wo die Elektroden anzulegen sind
- Sie bekommen folgende Einstellungsparameter mitgeteilt:
 1. die Stimulationsart (Burst, Normal, Modulation, SD1, SD2)
 2. die Frequenz (Hz)
 3. die Impulsweite (μs)
 4. die Therapiedauer in Minuten

i Die Einstellungen können von Ihrem Arzt auf Seite 26 der Bedienungsanleitung festgelegt werden.

Die Geräteeinstellung wird dann von Ihnen folgendermaßen eingegeben:

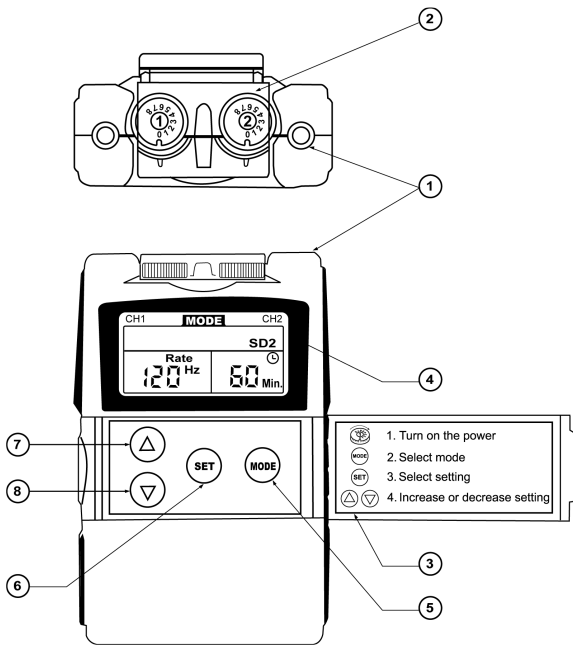
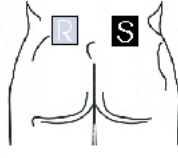
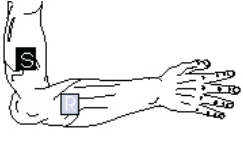
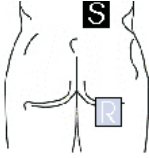
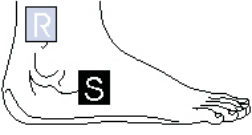


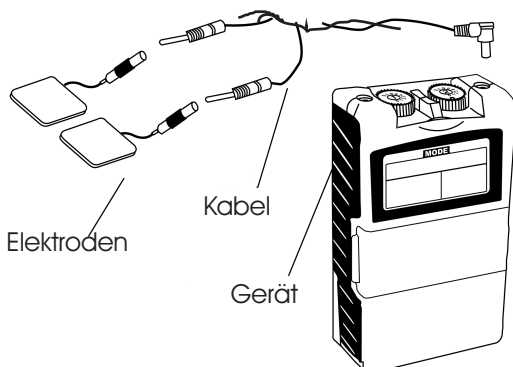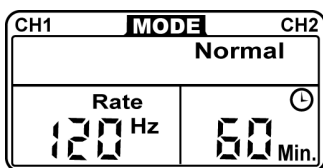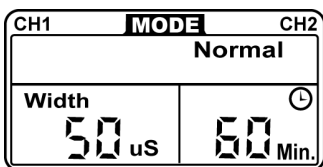


1. Gerät am Drehregler (2) einschalten. Im Display (4) sind die aktuell eingestellten Parameter sichtbar.
2. Öffnen Sie die Klappe (3) unter dem Display.
3. Drücken Sie die MODE-Taste (5) so oft, bis das gewünschte Programm (*Burst, Normal, Modulation, SD1, SD2*) ausgewählt ist.
- 4a. Drücken Sie die SET-Taste (6) einmal. Die Anzeige "Width" blinkt. Stellen Sie mit der ∇ - oder \blacktriangle -Taste die gewünschte Impulsbreite [μs] ein.
- 4b. Drücken Sie die SET-Taste nochmals. Die Anzeige "Rate" blinkt. Stellen Sie mit der ∇ - oder \blacktriangle -Taste die gewünschte Frequenz [Hz] ein.
- 4c. Drücken Sie die SET-Taste nochmals. Die rechte Anzeige blinkt. Stellen Sie mit der ∇ - oder \blacktriangle -Taste die gewünschte Therapiedauer [Min.] ein.
5. Schließen Sie die Klappe, kontrollieren Sie die gemachten Einstellungen und schalten Sie das Gerät am Drehregler oben aus.



6. Verbinden Sie die Elektroden mit dem Kabel. Verbinden Sie das Kabel mit dem Gerät. Kleben Sie die Elektroden an die von Ihrem Therapeuten genannten gereinigten Stellen auf.
7. Schalten Sie das Gerät am Drehregler neben dem Kabel ein und erhöhen Sie die Intensität durch Drehen im Uhrzeigersinn.
8. Schalten Sie nach der Behandlung das Gerät am Drehregler mit einem hörbaren Klick wieder aus. Reinigen Sie die Elektroden täglich mit klarem Wasser. Kleben Sie anschließend die Elektroden nass wieder auf die Schutzfolie.

Unverbindliche Therapiebeispiele für die TENS-Therapie

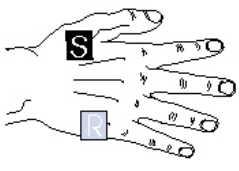 <p>Nackenschmerzen Normal, 80Hz, 180µs oder Burst, 2Hz, 180µs</p>	 <p>Rückenschmerzen Normal, 80Hz, 180µs oder Burst, 2 Hz, 180µs</p>	 <p>Tennis-Ellenbogen Normal, 2Hz, 180µs oder Normal 80Hz, 180µs</p>	 <p>Lumboischialgie Normal, 80Hz, 180µs oder Normal 2Hz, 180µs</p>
 <p>Verstauchung Fuß Normal, 80Hz, 180µs</p>	 <p>Knieschmerzen Normal, 80Hz, 180µs</p>	 <p>Schulter-Arm-Sch. Normal, 2Hz, 180µs</p>	 <p>Kaada-Stimulation Burst, 2Hz, 180µs</p>