

## Einleitung

Das IncoMOVE ist ein Medizinprodukt der Klasse 1. Es wurde für die Behandlung ausgewählter Formen von Harn- und Stuhlinkontinenz entwickelt. Dazu stehen verschiedene Programme zur Auswahl.

Die Programmauswahl wird üblicherweise von uns anhand der ärztlichen Vorgaben vor der Geräteübergabe einmalig vorgenommen und dann gegen eine versehentliche Verstellung gesperrt.



## Reinigen des Sensors

Den Sensor nach jedem Gebrauch unter fließendem, handwarmem Wasser reinigen. Bei starker Verschmutzung zusätzlich Seife oder Waschlotion verwenden. Sensor mit weichem Tuch abtrocknen und in einem unverschlossenen Kunststoffbeutel aufbewahren.

Stecker nicht nass machen. Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden. Die Kontaktelektroden könnten zerstört werden.

## Wichtiger Hinweis

Diese Kurzanleitung ergänzt die Gebrauchsanweisung des IncoPULS P. Bevor Sie das Therapiegerät verwenden, sind alle medizinischen und technischen Hinweise der Gebrauchsanleitung zu beachten. Das IncoPULS P darf nicht auf der alleinigen Grundlage dieser Zusatzinformation angewendet werden.


## Kurzanleitung für Patienten

Zusatzinformationen zur Gebrauchsanweisung für das EMG-Biofeedbackgerät IncoMOVE zur Behandlung von Inkontinenz




## Zusammenbau und Inbetriebnahme


1. Kopfhörer mit dem Gerät verbinden:

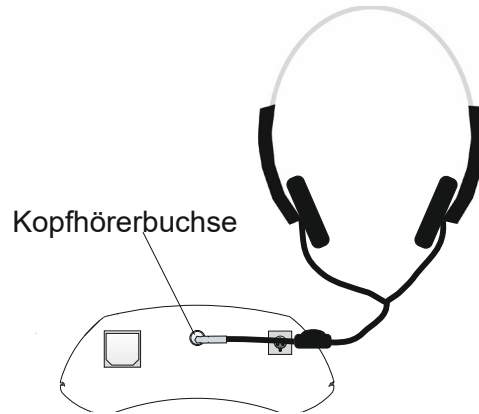

2. Sonde/Elektroden mit dem Gerät verbinden.

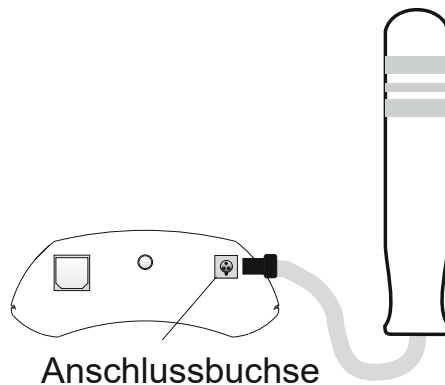


3. Einen Tropfen Gleitgel auf die Spitze der Sonde geben.
4. Sonde einführen:
  - mit Vaginalsonde in Rückenlage
  - mit Rektalsonde in Seitenlage
  - mit Klebeelektroden in Rückenlage
5. Gerät einschalten, durch langes Drücken der „Start/Pause“-Taste.

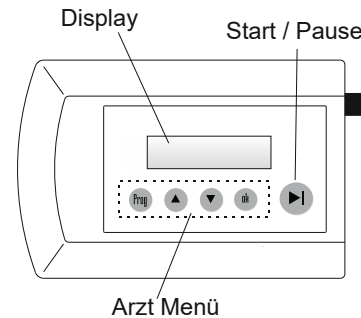

6. Folgen Sie den Anweisungen über Kopfhörer bzw. im Display und spannen Sie ihren Beckenboden bei der Maximalwertbestimmung 3x an.

7. Im anschließenden Training soll sich nach der Aufforderung „Anspannen“ die Balkenanzeige rechts von der Anspannschwelle befinden.

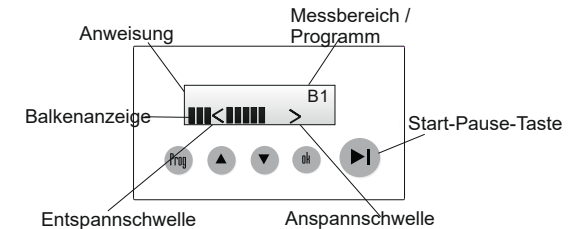

8. Nach der Aufforderung „Entspannen“ soll sich die Balkenanzeige links von der Entspannschwelle befinden.
9. Falls Sie die Therapie kurz unterbrechen müssen, drücken Sie kurz die „Start/Pause“-Taste.
10. Zum Beenden der Unterbrechung drücken Sie nochmals kurz die „Start/Pause“-Taste.
11. Am Ende der Therapiesitzung schaltet sich das Gerät selbständig aus.